

# Pharmagel<sup>®</sup> **medicazione in Idrogel**



## **DESCRIZIONE**

Pharmagel<sup>®</sup> è una medicazione sterile costituita da un cuscinetto di Idrogel, applicato su di un supporto di film di poliuretano semi impermeabile, trasparente, morbido e flessibile.

## **COMPOSIZIONE**

SUPPORTO: film di poliuretano;

MATRICE: Idrogel (70% acqua – 30% prepolimero addensante);

## **AZIONE CLINICA**

Il rivestimento in film di poliuretano favorisce la formazione di un microclima caldo umido a temperatura e pressione costante con carica batterica controllata.

La matrice in Idrogel idratando massivamente il tessuto necrotico e/o fibrinoso, adeso al fondo della lesione, ne genera lo sbrigliamento autolitico e, contemporaneamente, attiva i processi di granulazione e riepitelizzazione

## **CARATTERISTICHE**

- Produzione di un microclima caldo umido
- Induzione alla detersione autolitica
- Induzione alla granulazione e riepitelizzazione
- Gestione dell'essudato
- Barriera contro microorganismi e batteri
- Latex Free
- Rimozione atraumatica
- Ipollargenica

# Pharmagel<sup>®</sup> **medicazione in Idrogel**

## **INDICAZIONI**

Adatto per il trattamento di ferite croniche e di ferite a guarigione lenta nella fase di epitelializzazione della granulazione.

A causa della struttura tridimensionale di Pharmagel<sup>®</sup> e dell'alto contenuto di acqua, è adatto all'uso in presenza di sbrigliamento e per bruciate di secondo grado

## **CONTROINDICAZIONI**

Pharmagel<sup>®</sup> non deve essere utilizzato su ferite infette né su ferite di terzo grado. Non deve inoltre essere utilizzato su ferite ad alta essudazione né su muscoli, ossa o tendini esposti

PRODOTTO	CODICE	MISURA	Pz/Box	Box/Scatola
Pharmagel <sup>®</sup>	Gel 100100	100 x 100 mm	5	48
Pharmagel <sup>®</sup>	Gel 150150	150 x 150 mm	5	24
Pharmagel <sup>®</sup>	Gel 200200	200 x 200 mm	5	24

**CND M04040501**

**Rep. N. 336944**

## **AVVERTENZE**

Le caratteristiche tecniche del dispositivo restano inalterate fino alla scadenza del prodotto se le informazioni di stoccaggio presenti sull'etichetta vengono accuratamente eseguite.

Conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.

Si raccomanda di sostituire la medicazione al massimo ogni 72 ore.

## **APPLICAZIONE**

Aprire la confezione utilizzando l'apposito invito, rimuovere la carta plastificata di protezione ed applicare sulla lesione.

Per le caratteristiche intrinseche dell'idrogel la medicazione si conformerà al tessuto perilesionale con una leggera azione adesiva.

Si consiglia per un fissaggio più stabile di utilizzare un film di pellicola di poliuretano con un perimetro maggiore di almeno 2 cm. per lato rispetto alle dimensioni della medicazione

## **RIMOZIONE**

Rimozione atraumatica, non necessita di alcuna particolare procedura. Eventualmente, risciacquare delicatamente la cute lesa con soluzione fisiologica e l'ausilio di una siringa prima dell'applicazione di una nuova medicazione.