


12



13

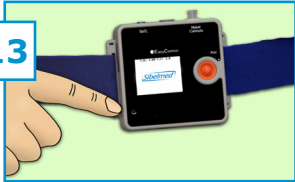


14



MOVIMENTO (PLM)

- Posizionare il sensore sulla caviglia o al polso (12).
- Fissare il cavo con un nastro adesivo ipoallergenico (12).
- Collegare il connettore di colore **grigio chiaro** all'ingresso "Aux" (12 a) e (8).

AVVIO DEL TEST (MODALITÀ MANUALE)

- Mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento  fino a quando il dispositivo non si accende (13).
- Premere il joystick per avviare il test. Una spia sotto lo schermo inizierà a lampeggiare per confermare l'avvio del test (14).

TERMINE DEL TEST (MODALITÀ MANUALE)

- Mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché non appare il messaggio **"ARRESTO DEL DISPOSITIVO"** (13).

AVVIO E TERMINE DEL TEST (MODALITÀ AUTOMATICA)

- Il dispositivo può essere programmato per iniziare e terminare il test ad un'ora specifica. In tal caso, l'avvio e il termine del test saranno automatici.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ

- Il dispositivo deve essere **trasportato** nella custodia fornita e nelle seguenti condizioni:
T: da -20 a 60 °C. U: < 93% senza condensazione
- Le condizioni di **utilizzo** devono essere:
T: da 5 a 40 °C. U: da 15 a 93% senza condensazione

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE



CE 0197

Prodotto di categoria IIa a norma della Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici


SIBEL S.A.U. Rossellón 500 bajos, 08026 BARCELONA - (Spagna)
Uff. vendite nazionali: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Uff. vendite internazionali: Tel.+34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servizio Post-Vendita: Tel.+34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
Fax: +34 93 436 16 11 www.sibelmed.com



534-7AB-GR6 Rev. 1.03 2015-12

Sibelmed


Guida rapida

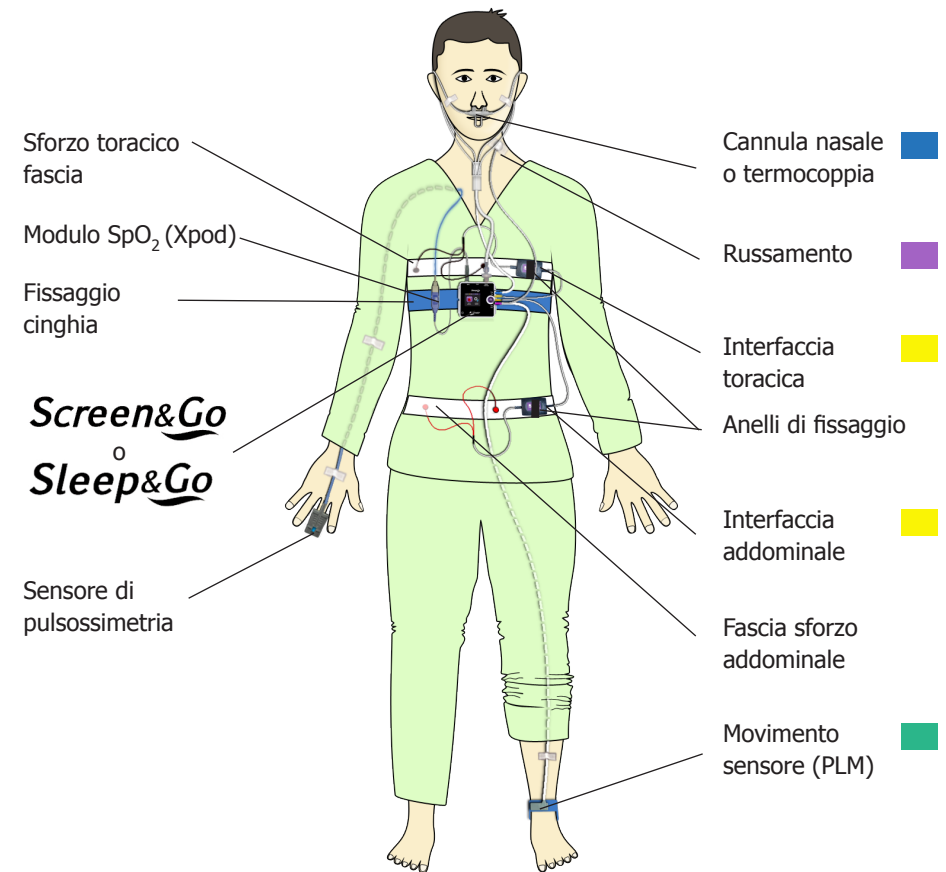

1





2

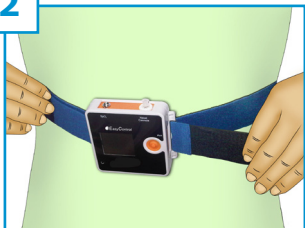


CANNULA NASALE

- Posizionare la cannula nasale come mostrato nell'immagine (3). Usare del nastro adesivo ipoallergenico per fissare la cannula alle guance.
- Collegare la cannula all'ingresso "Nasal cannula" e ruotarla fino a quando la connessione non è completata (3a).
- Regolare la lunghezza sotto il mento (3b).

4

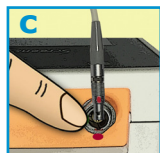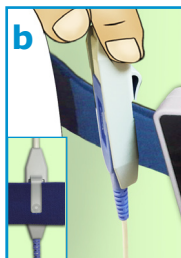


5

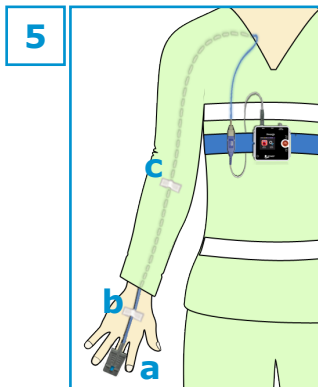

CINGHIA DI FISSAGGIO

- Far passare la cinghia di fissaggio a lato del dispositivo, piegandola e attaccandola su se stessa (1).
- Posizionare il dispositivo tra l'addome e il torace e far passare la cinghia intorno al corpo.
- Far passare l'altra estremità della cinghia sull'altro lato del dispositivo e regolarla in modo che sia fissata saldamente. (2).

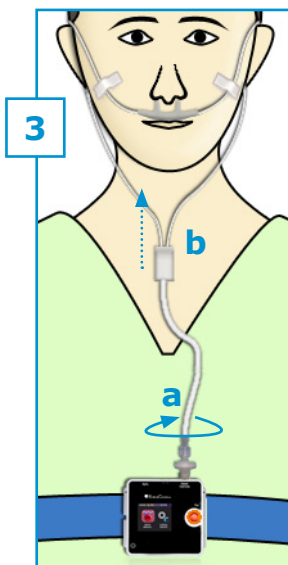


PULSOSSIMETRIA

- Con il sensore di pulsossimetria collegato all'Xpod, agganciare l'Xpod alla clip (4a) e attaccarla alla fascia, con il cavo lungo del sensore rivolto verso l'alto (4b).
- Collegare il cavo corto dall'Xpod al connettore "SpO₂" sul dispositivo, in corrispondenza dei due contrassegni rossi (4c).
- Inserire il dito indice o medio nel sensore fino al limite (5a).
- Attaccare il cavo alla mano e all'avambraccio con del nastro adesivo (5b and 5c).


Nota:

- Si raccomanda di posizionare il cavo lungo il braccio all'interno del pigiama.

6

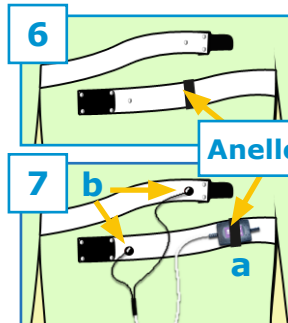


7

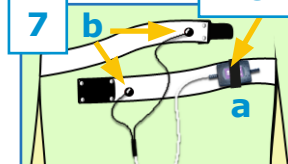

8



9

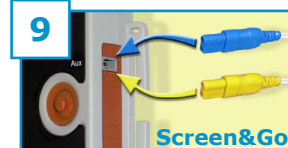

FASCE DI SFORZO

- Regolare le fasce di sforzo intorno al torace e/o addome, dopo aver precedentemente inserito gli anelli di fissaggio (6).
- Posizionare la cassetta "Chest" (interfaccia toracica) sulla banda toracica con il velcro e assicurarla con l'anello di fissaggio (7a).
- Procedere allo stesso modo con la cassetta "Abd" (interfaccia addominale) sulla fascia addominale.
- Collegare i connettori del tipo a "clip" ai supporti della fascia corrispondente (7b).
- Collegare le cassette ("Chest" e/o "Abd") agli ingressi "Tho" e/o "Abd" dell'apparecchio (connettore giallo). (8).

Nota:

- Per lo Screen&Go, collegare la cassetta ("Chest" o "Abd") all'ingresso "Aux" (connettore grigio chiaro) (9).


FLUSSO TERMOCOPPIA

- Posizionare il sensore a termocoppia sul labbro superiore. Piegare i le sonde nasali (10b), in modo che le estremità siano rivolte verso le narici, ma senza toccare la pelle. Fissare i cavi alle guance con del nastro adesivo ipoallergenico (10).
- Piegar la sonda orale (10c) di fronte alla bocca, senza toccare la pelle o le labbra.
- Collegare il sensore all'ingresso del dispositivo (10a):
 - "Tho" (connettore blu) per lo Sleep&Go (8)
 - "Aux" (connettore grigio chiaro) per lo Screen&Go (9)

RUSSAMENTO

- Posizionare il sensore sulla parte del collo sotto la guancia (non direttamente sopra la laringe).
- Fissare con nastro adesivo ipoallergenico (11b).
- Collegare il sensore all'ingresso "Aux" (connettore grigio chiaro) (11a) and (8).

10

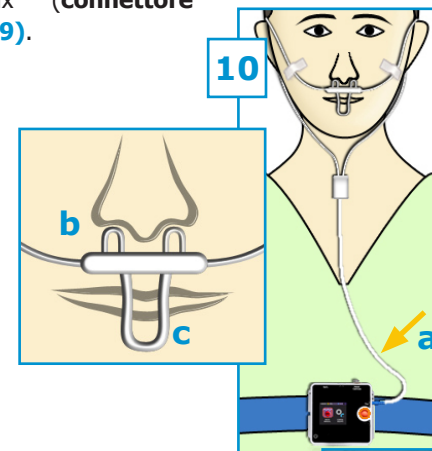

11

